

Überblick der Arbeitsschritte beim Dental-Implantatsystem ROSI®

- 1.**
Bei Sofort- Früh- oder Spätimplantation wird die Gingiva aufgeklappt, so dass ein übersichtliches Operationsgebiet entsteht.
- 2.**
Die Bohrung und Kippbohrung ist so zu planen, dass eine hohe Primärstabilität zu erwarten ist.
- 3.**
Nach den Vorbohrungen erfolgt die endgültige Bohrung mit 4,0 mm.
- 4.**
Anlegen der Kipplehre und Ausrichten derselben in die gewünschte Kipprichtung.
- 5.**
Anlegen einer Sonde an der Kipplehre.
- 6.**
Markierung mit einem Rosenbohrer bei gehaltener Sonde. Danach entfernen der Sonde.
- 7.**
Danach wird mit einem Bohrer (Ø 3,5 mm), mit stumpfen, **n i c h t** schneidendem Bohrkopf **per Hand** und ohne Bohrstopp bis zur Markierung gekippt.
- 8.**
Einsetzen des Implantates mit aufgesetztem Gingivaformer.
- 9.**
Prüfung auf Primärstabilität mit Finger oder z.B. Periotest®.
- 10.**
Vernähen der Gingiva.

Vertrieb:

DR. BOEHM GMBH
Tizianstr.33, D-90453 Nürnberg
Tel. +49-911-6327825
Fax +49-911-635325
info@dr-boehm.de
www.dr-boehm.de