

DR. BOEHM GmbH

Tizianstr. 33
D-90453 Nürnberg



Telefon: +49 (0)9 11 - 6 32 78 25

Fax: +49 (0)9 11 - 63 53 25

E-Mail: info@Dr-Boehm.de

Internet: www.Dr-Boehm.de

Flexy®-Löffel nach DR. BOEHM

- Der einzige Löffel, der beim Schlucken im Mund bleiben kann – so wie ein Sauger!
- Weicher Löffel in den Shore-Härten 70, 80 und (bei Löffel maxi) 90
sowie Mundteil Sh 70 und Griff Sh 90, sowie (bei Löffel maxi Mundteil Sh 70 und Griff Sh 90.
- Erleichterung beim Füttern von Kleinkindern.
- Beim Füttern von behinderten Personen.
- Generell wird beim Füttern weniger verkleckert.
- Keine Verletzungsgefahr (z. B. am Gaumen bei Spaltpatienten).
- Ideal für die Arbeit der Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten.

Das Löffelmaterial entspricht internationalen Normen (EEC, FDA).

Der Flexy®-Löffel

revolutioniert die Fütterungstechnik

Jeder kennt die Situation:

Füttern kann sehr stressig sein!

Der normale Löffel wird mit der Nahrung in den Mund geschoben, umgedreht oder hochgezogen und es wird versucht, die Nahrung irgendwie abzustreifen.

Mit etwas Glück bleibt ein Teil der Nahrung im Mund.

Der größte Teile der Nahrung wird vom Kleinkind wieder nach aussen gedrückt.

Jetzt muss der "Rest" von den Lippen und der Nase "abgekratzt" werden.

Das Spielchen fängt von vorne an.

Der Grund:

Mit einem harten Löffel im Mund, aber auch mit allen bisher bekannten weichen Löffeln, kann der Mensch nicht schlucken.

Das geht grundsätzlich nicht!

Um schlucken zu können, muß bei dieser Art von Löffeln der Löffel wieder aus dem Mund gezogen werden.

Gleichzeitig müssen die Lippen die Nahrung vom Löffel abstreifen, so dass diese in der Mundhöhle verbleibt.

Erst jetzt kann geschluckt werden.

Säuglinge, die bislang die Nahrung durch Saugen von der Brust oder der Flasche aufgenommen haben, müssen diesen Vorgang jedoch erst erlernen.

Dies dauert einige Monate. Alle Menschen, die aufgrund von Krankheit, Unfall oder altersbedingt zur Steuerung der Lippenmuskulatur nicht mehr in der Lage sind, haben ein ähnliches Problem.

Damit ist jetzt Schluss!

Mit dem superweichen Flexy®-Löffel wird Füttern zum Kinderspiel!

Stressfrei füttern mit dem Flexy®-Löffel

FUNKTION des Flexy®-Löffel:

Die Zunge drückt den Löffel beim Schlucken an den Gaumen. Der nach oben offene (konkave) Löffel wird dabei umgestülpt und passt sich exakt dem Gaumen an. Seine Form wird durch die Gaumenwölbung konvex.

Der Nahrungsbrei wird dabei seitlich in die Mundhöhle gepresst. Die Zunge gelangt dadurch so nahe an den Gaumen, dass der Schluckreflex ausgelöst wird.

VORTEILE des Flexy®-Löffel:

Eine angenehme Erleichterung beim Füttern!

Es wird viel weniger verkleckert. Das Füttern geht nicht nur schneller, es wird auch sicherer.

Ein Brechen oder Aufsplintern des Löffels ist ausgeschlossen. Somit kann eine Verletzungsgefahr beim Sturz mit dem Löffel im Mund nahezu ausgeschlossen werden.

EMPFEHLUNGEN:

Weitere Vorteile für die Arbeit der Logopäden ist die Möglichkeit der Stimulierung der Buccinatoren mit Hilfe des Flexy®-Löffels.

Aus diesem Grund empfiehlt der international bekannte Spezialist für Patienten mit orofacialen, neurologischen Störungen Prof. Dr. Castillo Morales den Flexy®-Löffel in seinen Seminaren.

Flexy®-Löffel sicher und sauber

HYGIENE:

- Vor Erst- und Folgegebrauch 10 min. auskochen.
- Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
- Sterilisierbar im Autoklav mit Wasserdampf bis 135 °C.
- Spülmaschinenfest.

MATERIAL:

Das Material ist ein Elastomer und entspricht allen Richtlinien der EEC und FDA.

UNTERSUCHUNGEN:

Die Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) v. 30.7.2003 ergab: "keine Beanstandung"

SICHERHEIT:

- Vor jeder Benutzung Reißfestigkeit durch kräftiges Ziehen am Mundteil prüfen.
- Löffel stets auf Gebrauchsspuren prüfen.
- Bei Beschädigung oder sichtbarer Alterung den Löffel austauschen.
- Nicht in Kontakt bringen mit Stoffen auf rein öliger oder fettiger Basis.
- Kontakt mit saueren Medien vermeiden.
- Der Löffel ist als Kauspielzeug nicht geeignet.

Flexy®-Löffel

Den Löffel gibt es verblister (= verpackt):

- SET Flexy®-Löffel mini 1 x rot und 1 x blau, Sh 70
- SET Flexy®-Löffel **maxi** 1 x rot, Sh 70

unverblister (= lose):

- Flexy®-Löffel mini blau oder rot, Sh 70
- Flexy®-Löffel mini dunkelblau, Sh 80
- Flexy®-Löffel **maxi** rot, Sh 70
- Flexy®-Löffel **maxi** blau, Sh 80
- Flexy®-Löffel **maxi** dunkelblau, Sh 90
- Flexy®-Löffel **2K maxi** Mundteil Sh 70, Griff Sh 90