

DR. BOEHM GmbH

Tizianstr. 33
D-90453 Nürnberg



Telefon: +49 (0)9 11 - 6 32 78 25
Fax: +49 (0)9 11 - 63 53 25

E-Mail: info@Dr-Boehm.de
Internet: www.Dr-Boehm.de

LUCKYDENT® - Schnuller nach DR. BOEHM

- Der Schnuller unterstützt den angeborenen Schluckreflex mit kieferformender Wirkung.
- Positive kieferformende Wirkung.
- Spülmaschinenfest und sterilisierbar bis 135°C.
- Hygienisch, da keine Ritzen oder Hohlräume vorhanden.
- Keine Verletzungsgefahr!
- Das Schnullermaterial entspricht den EU Normen (EEC) und den FDA Empfehlungen.

Funktion und Nutzung des LUCKYDENT® – Schnullers

Durch die Berührung der Zunge mit dem Mundteil des LUCKYDENT® – Schnuller wird der angeborene Schluckreflex des Säuglings unmittelbar ausgelöst. Dabei drückt die Zunge das Mundteil an den Gaumen. Beim anschließenden Schluckvorgang zieht die Zunge wegen eines vorhandenen Wulstes am Mundteil den gesamten Schnuller ein kleines Stückchen in Richtung Mundinnenraum.

Das Schild des Schnullers wird so ohne Zubeißen von selbst an die Lippen gepresst.

Der Säugling braucht das "Schnuller-Saugen" nicht zu erlernen.

Die Nutzung erfolgt rein instinktiv.

Der LUCKYDENT® – Schnuller wird automatisch festgehalten!

Vorteile des LUCKYDENT® - Schnullers

Der LUCKYDENT® – Schnuller fällt daher seltener aus dem Mund.

Allein durch den angeborenen Schluckreflex kann der Säugling den Schnuller festhalten. Der angeborene Zungendruck des Säuglings fördert die korrekte Formung des Gaumens. Selbst bei geöffnetem Mund kann der Säugling den LUCKYDENT® – Schnuller nur mit der Zungenspitze festhalten. Das weiche Schild verhindert die potentielle Gefahr einer Verletzung im Lippenbereich.

Der aus einem einzigen Stück gefertigte LUCKYDENT® – Schnuller hat weder Ritzen noch Spalten. Nach dem Abkochen kann das Schild durch Fingerdruck in die für den Säugling optimale Form modelliert werden. Sofortiges Abkühlen im kalten Wasser fixiert die gewünschte Formgebung (= "Memory"-Effekt).

Der LUCKYDENT® – Schnuller passt sich jedem Säugling an und sorgt so für beste Beruhigung!

HYGIENE

- Vor Erstgebrauch auskochen.
- spülmaschinenfest.
- sterilisierbar im Autoklav mit Wasserdampf bis 135 °C.
- Vor jedem weiteren Gebrauch gründlich-reinigen und sterilisieren.

MATERIAL

Das Material ist ein Elastomer und entspricht allen Richtlinien der EEC und FDA.

SICHERHEIT

Vor jeder Benutzung Reißfestigkeit durch kräftiges Ziehen am Mundteil prüfen. Schnuller stets auf Gebrauchsspuren prüfen.

Bei Beschädigung oder sichtbarer Alterung Schnuller austauschen. Nicht in Kontakt bringen mit Stoffen auf rein öliger oder fettiger Basis.

Es ist zu beachten, dass das Schnuller-Material aufgrund des hohen Calcium-Carbonatgehaltes bei allen Anwendungen, bei denen er in Kontakt mit sauren Medien kommt, nur mit Vorsicht eingesetzt werden soll.

Der Schnuller ist nicht als Kauspielzeug geeignet.

GRÖSSEN UND TYP

- den Schnuller gibt es für Säuglinge bis zur Zahnung (ca. 6 Monate alt)
- der Luckydent®-Schnuller ist erhältlich in den Farben rot oder blau.